



Covid-19 Antigen Rapid Test Professional

zur Anwendung durch geschultes Personal





Generalimporteur und Distributor DACH:

LES Egin & Schmidt GmbH & Co. KG Sebastian-Münster-Str. 6b 91438 Bad Windsheim

- Spezifität: 98,55%
- Genauigkeit: 99,49%
- BfArM Zulassung: AT 337/20
- PEI Evaluierung/Zulassung
- Keine umständliche Handhabung
(Fertig mit Pufferlösung vorbefüllte
Einwegröhrchen)

**Kein Einsatz von gesundheitsbedenklichen
Ethylen Oxid zur Sterilisation der Swabs.**

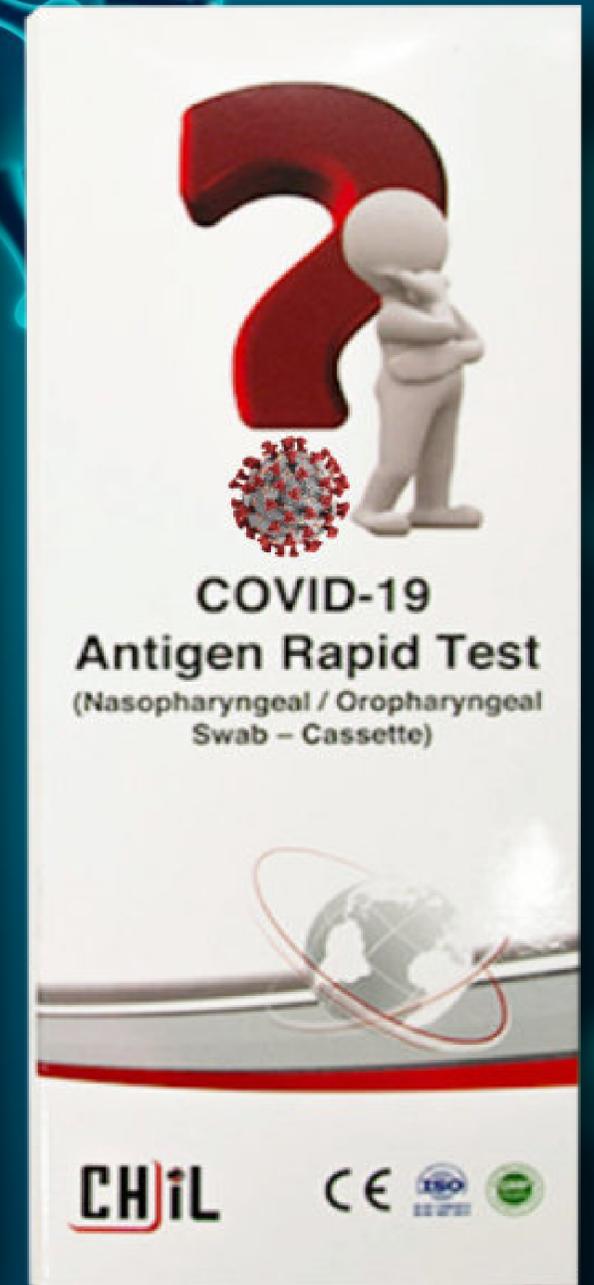


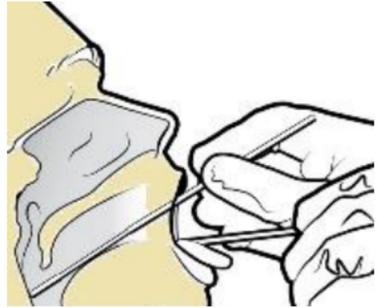

Oropharyngealer Abstrich



Nasopharyngealer Abstrich

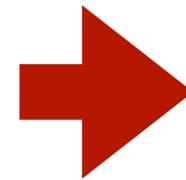


Proben Abstrich

Extraktionspufferröhrchen

Legen Sie den Tupfer in das Extraktionspufferröhrchen




Halten Sie das Extraktionsrohr wie oben senkrecht, um ein Verschütten zu vermeiden, und brechen Sie dann die Spitze des Röhrchens oder schneiden Sie es mit einer Schere ab


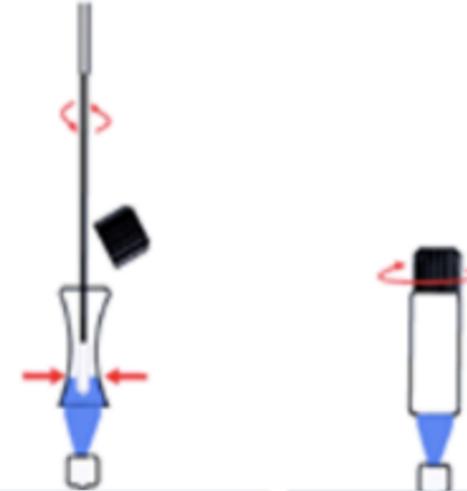


Mischen Sie den Tupfer mehr als 5 mal, während Sie das Pufferrohr zusammendrücken


Verschluss fest

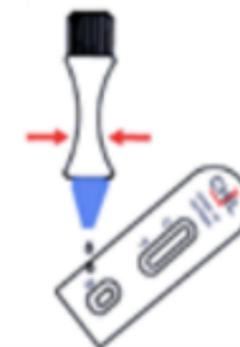


4 Tropfen der extrahierten Probe in die Probenvertiefung der Testkassette geben

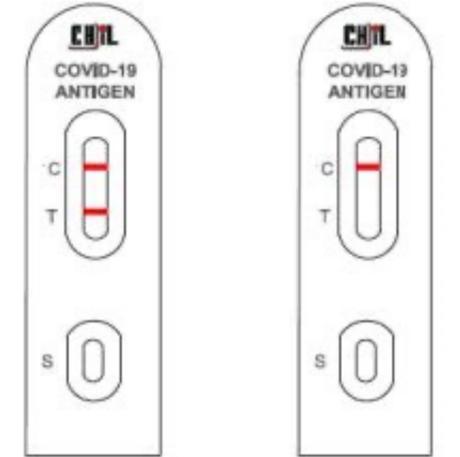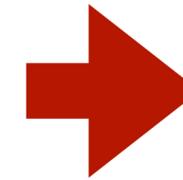

Positive

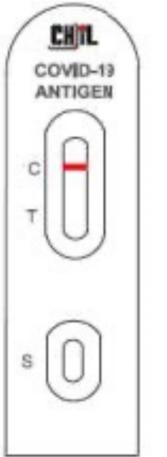


Negative

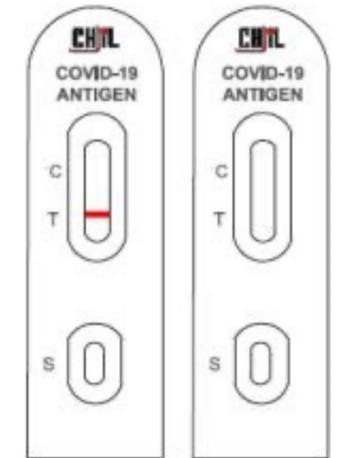

Invalid

- 1** Verschlusskappe abschrauben,
Swab in die Lösung geben und
Probe extrahieren.

Danach die Kapsel einfach
wieder verschrauben.

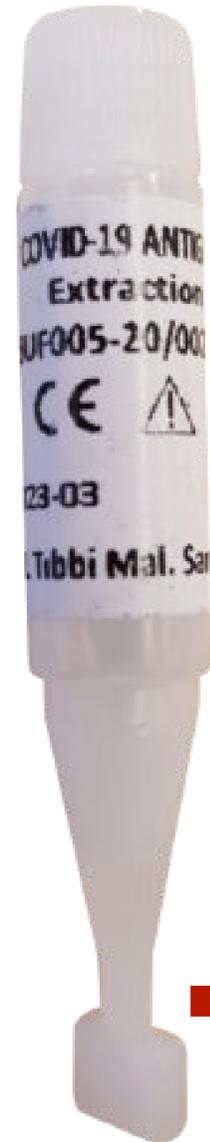

**Fertiges Extraktionsröhrchen:
Kein umständliches Umschütten
oder Anmischen notwendig!**

- 2** Spitze des Röhrchens abbrechen
und vier Tropfen auf die Probenkassette
geben.

**Schnelle Verfügbarkeit durch Lager in Deutschland
des Distributors für die DACH-Region LES International.**

Tägliches Dropshipping aus Europa optional.





Gegründet im Jahr 2012 mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung, ist CHIL mit seiner Marke für Schnelltests im Bereich der In-vitro-Diagnostik weltweit tätig. Unsere breite Produktpalette umfasst Infektionskrankheiten, Fruchtbarkeit, Tumormarker, Herzkrankheiten, Urinstreifen und Drogentests.

Als Diagnostikhersteller sind wir seit über 8 Jahren auch im Bereich Antigentests tätig.

Dank der Erfahrung, die wir in der nationalen und internationalen Gesetzgebung gesammelt haben, ist es uns gelungen, in kurzer Zeit alle Zulassungen von den relevanten autorisierten Stellen zu erhalten und unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten, indem wir in allen Phasen der Gesetzgebungsprozesse konform arbeiten. So auch im Bereich der COVID-19 Antigentests für professionelle und Laien-Anwendungen. Wir sind mittlerweile in über 100 Ländern tätig



LES International
Egib & Schmidt GmbH & Co. KG
Sebastian-Münster-Straße 6b
91438 Bad Windsheim
+49 (0)9841 - 14 54
www.lesint.com
info@lesint.com